

Guía de Solución de Problemas Ardo Melia

1. Sin vacío o vacío débil

Asegúrese de que el Ardo Melia esté correctamente ensamblado, en particular que el borde de la copa esté completamente por encima del borde de la copa recolectora (presione firmemente con ambas manos).

Asegúrese de que las piezas individuales no estén dañadas, especialmente la válvula de silicona (lip valve).

2. Dolor al extraer

La extracción no debe ser dolorosa. Si lo es, revise lo siguiente:

- · Asegúrese de que el pezón esté en el centro del embudo.
- · Verifique que el tamaño de la copa / inserto sea el correcto para su pezón.
- · Revise que la intensidad del vacío no esté configurada demasiado alta.
- · Contacte a un profesional para recibir ayuda.

3. El Ardo Melia tiene fugas

Las copas de silicona del Ardo Melia pueden desgastarse con el tiempo debido al uso, lavado y esterilización. Ocasionalmente, la bomba puede comenzar a gotear. La camisa debajo del pecho se moja durante la extracción y puede gotear leche al colocar la bomba sobre una superficie.

Cuando esto ocurra, es momento de reemplazar las piezas de silicona o al menos las copas. Por eso ofrecemos piezas de repuesto.

Esto puede suceder después de aproximadamente 3 meses, antes si se extrae muy frecuentemente (por ejemplo, 6 veces al día).

4. La batería solo dura 2 sesiones de 20 minutos después de 2 horas de carga Probablemente el Ardo Melia fue cargado con un cargador poco potente. Para cargar completamente en 2 horas, use un cargador (o dos) con las siguientes especificaciones mínimas:

5 V, 2 A (5 voltios, 2 amperios = 2000 mA)

Cargadores antiguos pueden tener menor potencia.

Si el cargador tiene mayor potencia (por ejemplo, 2100 mA), no es un problema.

5. Manchas en el Ardo Melia



Si el agua es muy dura, pueden formarse depósitos de cal tras varias limpiezas y esterilizaciones. Para evitarlos, agregue unas gotas de jugo de limón al agua durante la desinfección.

6. El Ardo Melia se apaga después de 20 minutos

El Ardo Melia se apaga automáticamente después de 20 minutos para evitar uso accidental o extracción excesiva. Si necesita más tiempo, simplemente vuelva a encenderlo.

7. ¿Necesito un sostén especial?

Use un sostén de material elástico. El Ardo Melia suele ajustarse mejor en un sostén de lactancia que en uno regular. Algunos prefieren un bralette o top ajustado.

8. Dificultad para colocar el Ardo Melia

- · Algunas usuarias colocan la bomba horizontalmente debajo del pecho y luego la inclinan hacia arriba.
- · Coloque la bomba primero y luego acople el motor.

9. La bomba comienza con vacío alto

El Ardo Melia tiene función de memoria y comenzará con el nivel de vacío usado previamente, excepto en modo automático que inicia en nivel 1. Desde verano 2025, siempre iniciará en nivel 1.

10. Se queda leche en la válvula

Después de extraer, vierta la leche normalmente. Luego retire la copa y apriete suavemente la válvula para recoger toda la leche.

11. Batería se descarga rápido

Una batería completamente cargada debe durar mínimo 100 minutos. Si no, y es una bomba nueva, se recomienda reemplazo.

12. La leche se derramó al sacar la bomba del sostén

- · Si aún hay vacío, coloque un dedo entre la bomba y el pecho para liberarlo.
- · Mantenga la bomba vertical al retirarla para evitar derrames.
- · Puede recostarse hacia atrás mientras bombea, pero no inclinarse hacia adelante.
- · La bomba puede colocarse en posición vertical en la mesa después de extraer.

13. No sale suficiente leche



- · Podría deberse a demasiada actividad mientras bombea. Relájese.
- · Mire a su bebé o una foto para estimular el flujo.
- 14. No hay suficiente vacío en una bomba
- ¿El pezón se introduce en el embudo?
- Si no: no hay vacío.
- a) Reensamble la bomba correctamente.
- b) Reemplace partes para identificar la defectuosa.
- Si sí: el problema puede ser otro (vea punto 13).
- 15. El ícono de Modo Masaje no se enciende La bomba debe ser reemplazada.
- 16. Se escucha un clic Un ligero clic durante el uso es normal.
- 17. Tengo senos muy grandes, ¿puedo usar Ardo Melia?
- Sí. Muchas madres con tallas grandes han usado Ardo Melia exitosamente.